

Aufhellung von Zähnen, „Bleaching to go“, mit Opalescence Trèswhite Supreme Step by Step

Die Materialien:



Opalescence Trèswhite Supreme- KombiTrays

Trays zur Zahnaufhellung, bestehend aus stabilem Außentray und einem Innentray aus superflexibler Folie, fertig beschickt mit 10%igem H₂O₂-Aufhellungsgel (O. Trèswhite Supreme 15%: 15%iges Gel). Das Außentray dient als Positionierhilfe; nur die Innenfolie mit dem Gel verbleibt während der Aufhellungsbehandlung auf den Zähnen. Zum Einmalgebrauch.

Der Ablauf:

Zahnsteinentfernung und professionelle Zahnreinigung,
gründliche Diagnose, Zahnfarben-Bestimmung.



Prüfen, ob Patient für die Behandlung mit Trèswhite Supreme geeignet ist:
Probleme sind zu erwarten z. B. bei stark gedreht stehenden Zähnen (Folie kann nicht optimal anliegen);
sehr kleinen Zähnen (Gelstrang kommt nicht auf die Zähne, sondern auf die Gingiva zu liegen);
freiliegenden Zahnhälsen (stärkere Empfindlichkeiten sind zu erwarten).
In diesen Fällen besser mit individueller Schiene aufhellen.



Gewünschtes Aroma auswählen (10%ige Gele: Mint, Melone oder Pfirsich; 15%iges Gel: Mint).
Dem Patient das Einsetzen des KombiTrays zeigen (siehe Gebrauchsanleitung und Patienten-Info).
Besonders wichtig: Tray möglichst nicht mit Finger andrücken, sondern lediglich
durch „Kussmund“, Schluckbewegungen, Lippen- und Zungendruck anformen.
Gel muss nicht den gesamten Zahn bedecken – Teilbereiche genügen, Wirkstoff verteilt sich im Zahn.
(auch unter Brackets und unter Zahnschmuck werden die Zähne hell!)



3-4 KombiTrays mitgeben, auf Anwendung einmal täglich 30-60 Min.
(bei Opalescence Trèswhite Supreme 15%: 15-20 Min.) hinweisen.
Bei auftretenden Empfindlichkeiten KombiTray sofort entfernen, mindestens einen Tag Pause machen.
Ggf. gegen Empfindlichkeiten UltraEZ-KombiTrays tragen lassen.
Kontrolltermin vereinbaren.



Beim Kontrolltermin Aufhellungsfortschritt beurteilen, ggf. weitere KombiTrays mitgeben.



Nach Ende der Zahnaufhellung erst nach ca. 2 Wochen definitive Adhäsiv-Füllungen legen, um Farbstabilisierung der Zähne und die Auswaschung der Sauerstoff-Ionen (→ würden das Bonding stören) abzuwarten.

Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.
