

# Fissurenversiegelung mit dem UltraSeal XT plus System

## Step by Step

### Die Materialien:



Ultra-Etch	PrimaDry	UltraSeal XT plus
Phosphorsäure-Gel, 35%ig, blau eingefärbt, ideale Konsistenz, zum Anätzen der Fissuren.	Trocknungs- und Primermittel, stark hygroskopisch, entfernt Feuchtigkeitsreste, hinterlässt hauchfeinen Primerfilm, der die Benetzung fördert.	Fissurenversiegler mit 58% Gew% Füller, thixotrop, wird bei entsprechender Applikation fließfähiger.
Applikation mit Inspiral Brush Tip	Applikation mit Blue Micro Tip	Applikation mit Inspiral Brush Tip

### Der Ablauf:

Fissuren mit fluoridfreier, ölfreier Polierpaste und Prophy-Bürstchen reinigen.

Alternativ: Mit Natriumbicarbonat-Pulverstrahl reinigen.



Ggf. Fissuren geringfügig öffnen, mit Diamantfinierer o. ä.



Ultra-Etch applizieren:

Mit Inspiral Brush Tip in die Fissuren einarbeiten.



Ultra-Etch 15-20 Sek. einwirken lassen, dann Gel absprayen.

Falls mit Natriumbicarbonat-Pulverstrahl gereinigt wurde: Ätzung zweimal vornehmen.



Fissuren mit Luftbläser gründlich trocknen.



Zu versiegelnde Zähne trockenlegen (mit Kofferdam oder Watterollen).



PrimaDry applizieren:

Mit Blue Micro Tip in die Fissuren laufen lassen.



PrimaDry 5 Sek. einwirken lassen,

dann die behandelten Fissuren mit Luftbläser anblasen – PrimaDry verdunstet sofort. Nicht abspülen!



UltraSeal XT plus applizieren:

Einen kleinen Tropfen UltraSeal XT plus extraoral aus der Bürstenspitze des Inspiral Brush Tips drücken, dann in die Fissuren einarbeiten.

Darauf achten, dass nur die Fissuren gefüllt werden, die Höckerabhänge jedoch frei von Versiegler bleiben.



20 Sek. mit Licht polymerisieren.



Okklusion prüfen.



Ggf. umgebenden Schmelz fluoridieren.

---

Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.  
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.

---