

Wurzelfüllung mit EndoREZ / EndoREZ Points / EndoREZ Accelerator

Step by Step

Die Materialien:



EndoREZ	Skini Syringe	NaviTips	EndoREZ Points / EndoREZ Accelerator
Hydrophiles, fließfähiges Wurzelfüll-Komposit auf UDMA-Basis, dualhärtend. Anmischung aus Doppelspritze durch den Mixing Tip.	Schlanke Applikationsspritze, zur Füllung aus der EndoREZ-Doppelspritze. Geringer Durchmesser, damit hoher hydraulischer Druck beim Applizieren.	Feine Kanülen, in vier Längen. Ø nur 0,3 mm (30 ga) bzw. 0,33 mm (29 ga – für EndoREZ empfohlen). Abgebogener Hals, federhart, an der Spitze weich und abgerundet.	Adhäsiv beschichtete Guttaperchaspitzen, in 6 Stärken und 3 Tapern. Für beschleunigte Aushärtung: Accessory Points in Accelerator tauchen.

Der Ablauf:

Wurzelkanal aufbereiten; gründlich spülen zur Reinigung und Desinfektion, mit EDTA und Natriumhypochlorit.
Keine H₂O₂-Lösung und oder H₂O₂-haltigen Präparate verwenden.

Schlussspülung mit EDTA-Lösung, phys. Kochsalzlösung, sterilem Wasser oder Lokalanästhetikum.



Trocknung des Kanals, z. B. mit Luer Vacuum Adapter, EndoEze Tips oder Capillary Tips, sowie 1-2 Papierspitzen. Kanal nicht übertrocknen; vor allem keinen Alkohol verwenden.



EndoREZ-Point als Masterpoint auswählen und im Kanal einpassen.



EndoREZ aus Doppelspritze anmischen: Kappe abnehmen. Auf gleichmäßigen Pastenfluss aus beiden Öffnungen der Doppelspritze achten. Mixing Tip aufsetzen. In Skini Syringe-Zylinder von hinten einbringen, in entsprechender Menge, je nach Kanal-Anzahl.

EndoREZ am Ende des Zylinders abschließen lassen, Spritzenstempel einsetzen.



NaviTip (empfohlen: Ø 0,33 mm / 29 ga) in entsprechender Länge auswählen, Arbeitslänge mit Stopper markieren.

NaviTip fest auf Skini Syringe aufschrauben. Materialfluss durch NaviTip prüfen; die ersten Tropfen verwerfen. Dabei auch auf die Fließgeschwindigkeit achten. Kanüle in zu füllenden Kanal einbringen, bis ca. 2 mm vor den Apex.



EndoREZ applizieren, durch Eindrücken des Spritzenstempels. Beobachten, wie EndoREZ im Kanal hochsteigt.

NaviTip langsam zurückziehen, jedoch stets im EndoREZ eingetaucht lassen.

Kanal bis ca. 2 mm unter den Kanaleingang füllen. EndoREZ-Masterpoint in den gefüllten Kanal nachschieben.



Weitere EndoREZ Points können als Accessory Points (# 25 und dünner) neben dem Masterpoint eingeschoben werden. Keine laterale Kondensation! Soll die Aushärtung beschleunigt werden, die Accessory Points zuvor in EndoREZ Accelerator tauchen, 2-4 Stück pro Kanal.



Ende(n) des Points / der Points mit heißem Instrument abtrennen. Oberfläche von EndoREZ mit Licht härten (40 Sek.). Dadurch entsteht eine ca. 0,5 mm dicke, feste Schicht, auf die eine Komposit-Deckfüllung aufgebracht werden kann.

EndoREZ härtet chemisch im Kanal nach dem Einsatz des Accelerators bereits in ca. 5 Min. durch; danach kann sofort ein Stiftloch präpariert werden. (Ohne Accelerator: Aushärtung in ca. 30-45 Min.).



Röntgenkontrolle der Wurzelfüllung.

**Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.**
